

Desinfección de Impresiones Dentales



Impresiones de alginato

Enjuagar con agua

Pulverizar hipoclorito sódico al 1%

Introducir en una bolsa hermética

Exposición: 10 min

Enjuagar



Siliconas y poliéteres

Sumergir en Hipoclorito

Sódico al 1%

Exposición: 15-20 min

Enjuagar

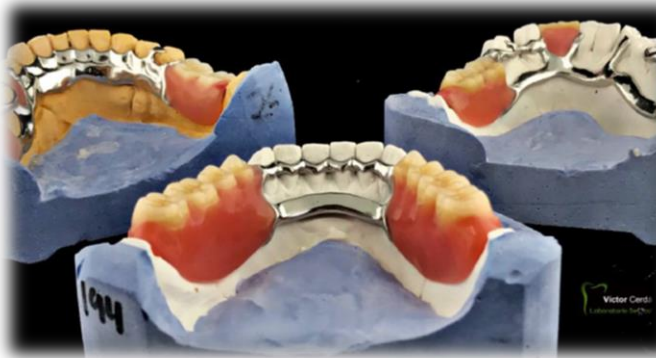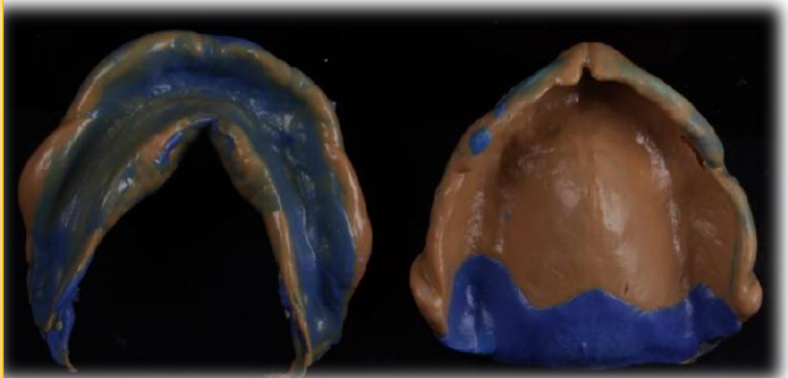

Prótesis esqueléticas

Sumergir en alcohol al 70%

Exposición: 5 min

Enjuagar

Prótesis acrílicas

Sumergir en Hipoclorito Sódico
al 1%

Exposición: 10 min

Enjuagar

