

LUXEN

DENTALMAX

CAD/CAM PRODUCT

Sobre nosotros.

¡LA CALIDAD ES LO PRIMERO! El mejor fabricante de circonio dental de Corea!!

DENTALMAX se fundó en 2009, con el objetivo de crear productos confiables y satisfactorios para todos.

Y como resultado de nuestros esfuerzos, lanzamos nuestra marca de circonio CAD / CAM "LUXEN" en 2013, convirtiéndonos en el fabricante de circonio dental más confiable en Corea.

Con nuestros conocimientos y experiencias, podríamos expandir con éxito nuestro negocio a nivel mundial, reconocido por sus excelentes e innovadoras cualidades.

Prometemos continuar desarrollándonos y mejorando para ser el líder avanzado del mercado dental.

IDENTIDAD

- 1 Estricto control de calidad de materias primas y productos.
- 2 Sistema de calidad y control basado en ISO 13485

Control
De
Calidad

- 1 Productos y tecnologías altamente competitivos de pruebas e investigaciones exhaustivas
- 2 Formación constante de expertos para desarrollar y adquirir continuamente nuevas habilidades.
- 3 Colaboración con instituciones de investigación para investigación y desarrollo

R & D

- 1 Desarrollar productos basados en el cliente
- 2 responder con prontitud a la retroalimentación del cliente
- 3 Buscar la mejora mutua y la innovación entre cliente y empresa.

Respeto

DMD Academy

- 1 Ofrecer numerosos cursos de formación y educación para el uso correcto de los productos.
- 2 Ofrecer información y estudios basados en casos clínicos

Educacion




CERTIFICADOS

KOREA	KGMP
EUROPE	CE
USA	FDA
JAPAN	MI ILW
TAWAN	TFDA
UKRAINE	UA.TR. 126
RUSSIA	RZN
ETC	CFS

PATENTES

MÉTODO DE PRODUCCIÓN EN OXIDO DE ZIRCONIA APLICADO AL COLOR (10-0876059) ADAPTED PROGRESSIVE CHROMATIC AESTHETIC (A.P.C.A.)
MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL BLOQUE MULTI EN OXIDOS DE ZIRCONIA PARA DIENTES ARTIFICIALES (10-1655996)

COLABORADORES GLOBALES

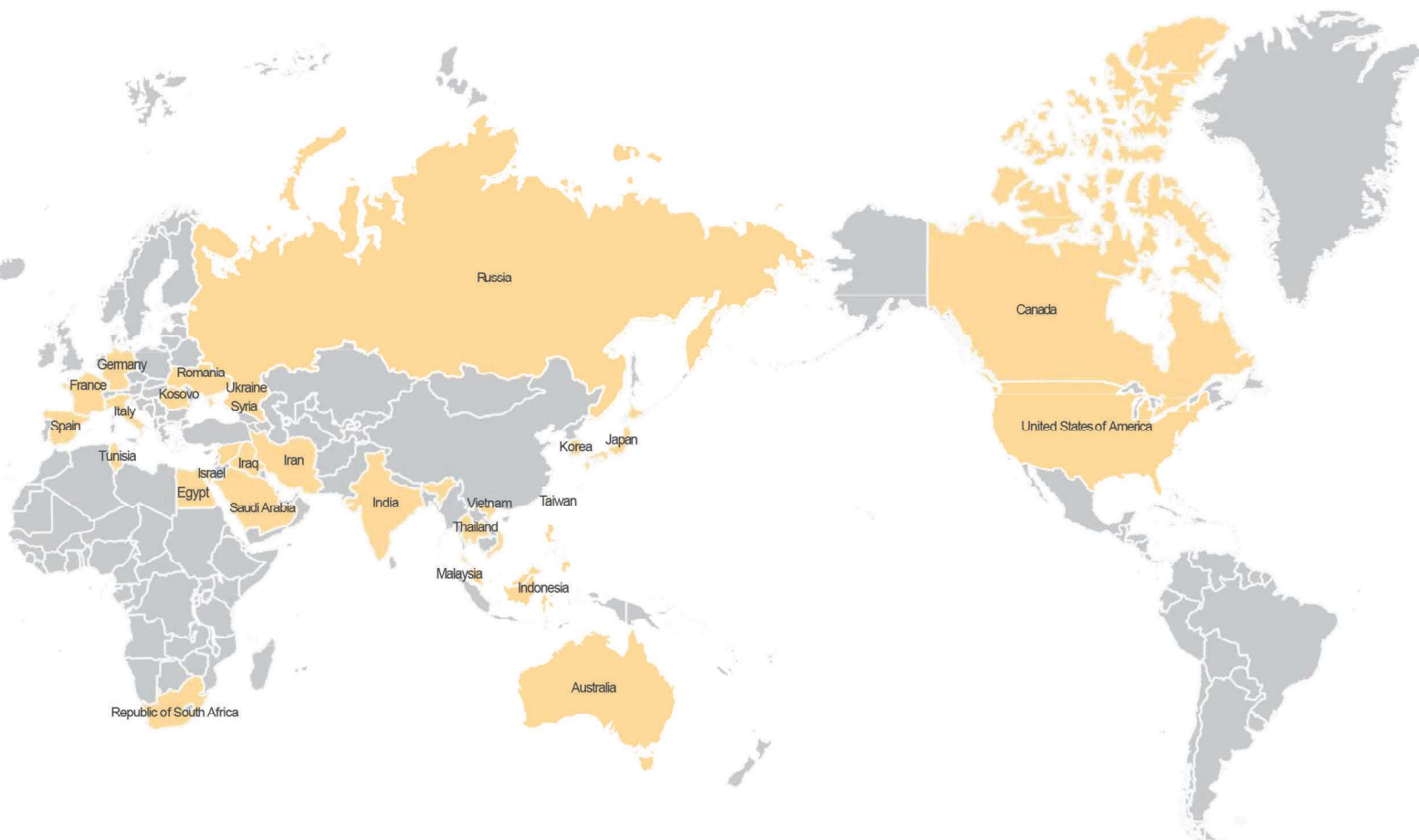




CONTENIDOS

MULTI LAYER BLOCK

- Ⓐ 1200+600 MULTI (BLANCO)
- Ⓑ 1200+600 MULTI (PRE-COLOREADO)
- Ⓒ 1100 MULTI (PRE-COLOREADO)

SUMARIO

1. Productos

PRODUCTO	MULTI LAYER		
	1200+600 MULTI		1100 MULTI
	BLANCO	PRE- COLOREADO	
IMAGEN			
RESISTENCIA	Incisal 700(±50)MPa Cervical 1200(±100)MPa	Incisal 700(±50)MPa Cervical 1200(±100)MPa	Incisal 1100(±100)MPa Cervical 1100(±100)MPa
TRANSLUCIDEZ	45~49%	42~49%	42~45%

2. Indicaciones



DISCO MULTI-LAYER

1200 + 600 MULTI (Blanco)

Expresa los tonos naturales mediante técnica de infiltración / inmersión.

Cree prótesis estéticas utilizando alta transparencia de incisal Express 16 tonos utilizando 1 solo disco



1. Seque la corona a 200 °C durante 15 minutos. (Se recomienda dejar un espacio para que el gas generado en el proceso de secado fluya hacia afuera)
2. Sinterice la corona seca con los programas recomendados..
3. Rápida colocación de capas naturales de esmalte y dentina por infiltración /inmersión.





Translucidez	
Resistencia	
Estetica	

Grosor

Tipo de Disco (Φ = 95 / 98 / 100)
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
25mm

Blanco


Shade coverage

Light	0M1, 0M2, 0M3 (bleaching) A1 B1
Medium	A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 D2, D3
Dark	A3, A3.5, A4 B3, B4 C3, C4 D3, D4

Indicaciones



Prog. sinterización

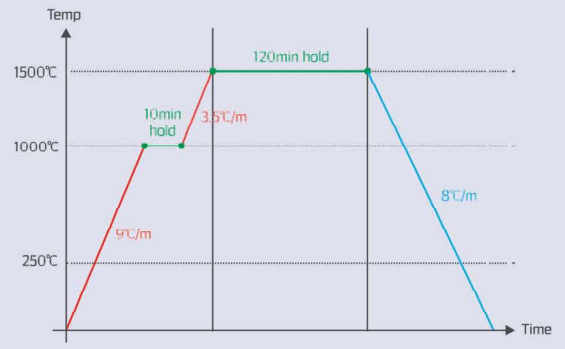

Translucent	Strength	Layer Portion
49%	700(+50)MPa	30% (incisal)
47%	900(+50)MPa	40% (middle)
45%	1100(±100)MPa	30% (cervical)

DISCOS MULTI-LAYER

1200 + 700 MULTI (Tonos precoloreado)

Alta transparencia en oclusal / incisal

Degradación de tonos naturales y resistencia

Simplifica la terminación monolítica y aumenta la eficiencia del trabajo 16 tonos VITA Classical

Full zirconio monolítico 14-13-12-11-21-22-23 (7-puente) & 24-25 (2-puente)
44-43-42-41-31-32-33-34 (8-puente) usando 1200+600 MULTI A2





Translucidez	
Resistencia	
Estetica	

Grosor

Tipo de Disco (Φ = 95 / 98 / 100)
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
25mm



Color

- MA1, MA2, MA3, MA3.5, MA4
- MB1, MB2, MB3, MB4
- MC1, MC2, MC3, MC4
- MD2, MD3, MD4

Indicaciones



Prog. sinterizacion

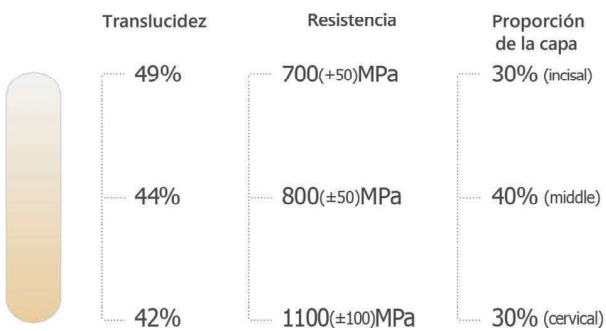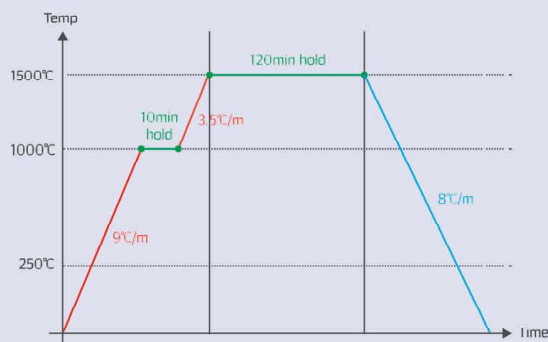

DISCO MULTI-LAYER

1100 MULTI (Tonos precoloreado)

Degradación natural de tonos y transparencia incisal.
Excelente resistencia para evitar fracturas en los márgenes,
puentes y grosores reducidos.
Bloque con degradación con la misma resistencia desde el
cuello hasta el incisal 16 tonos VITA Classical



Arcada completa
1100 MULTI A2





Grosor

Tipo de Disco (Φ = 95 / 98 / 100)
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
25mm



Color

- A1, A2, A3, A3.5, A4
- B1, B2, B3, B4
- C1, C2, C3, C4
- D2, D3, D4

Indicaciones



Prog. sinterización

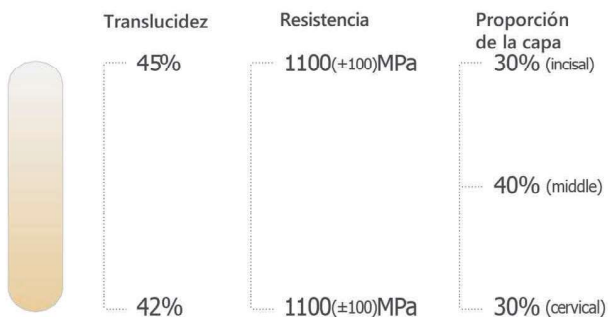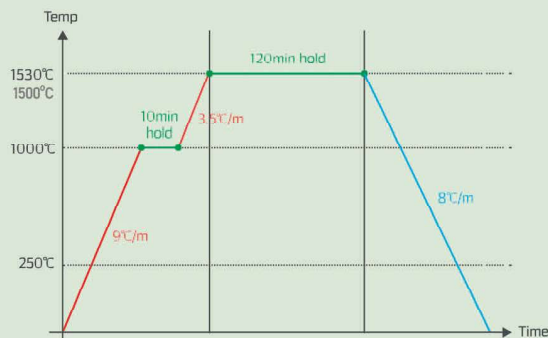

DMD⁰⁹

Luxen ZrO² esta elaborado con la mas cuidada selección de polvo ZrO² **TOSOH Premium**, aportando cualidades estéticas muy destacadas, mas una larga estabilidad y resistencia al envejecimiento en las estructuras eliminando las perdidas en la resistencia del material.



DentalDigiDent

DentalDigiDent Solutions S.L.
C/ Comunidad de Andalucía 33 Oficina 5, 28231 Las Rozas de Madrid., España.

Homepage: www.dentaldigident.com



DENTALMAX Co.,Ltd.
50-7, Pungsesandan 2-ro, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

Homepage : www.dentalmax.co.kr



Homepage



Instagram