



# LUXEN



made from 100%  
**TOSOH**  
zirconia powder  
www.dentalmax.co.kr

## LUXEN

Tabla de programacion Luxen ZrO<sub>2</sub> valores en Temperatura y tiempos de incremento y decremento en H/Min

Pasos	Temperatura inicio	Tiempo Subida / Bajada H/Min	Temperatura final	Tiempo de mantenimiento H/Min
1º	20-25°C	1:51	1000°C	0:10
2º	1000°C	2:23	1500°C	2:00
3º	1500°C	2:43	200°C	0:00

## LUXEN

Tabla de programacion Luxen ZrO<sub>2</sub> valores en Temperatura e incremento y decremento en Cº /Hora

Pasos	Temperatura inicio	Subida / Bajada Grados°C/Hora	Temperatura final	Tiempo de mantenimiento H/Min
1º	20-25°C	540°C	1000°C	0:10
2º	1000°C	210°C	1500°C	2:00
3º	1500°C	480°C	200°C	0:00

## LUXEN

Tabla de programacion Luxen ZrO<sub>2</sub> valores en Temperatura e incremento y decremento en °C /Min

Pasos	Temperatura inicio	Subida / Bajada Grados°C/Min	Temperatura final	Tiempo de mantenimiento H/Min
1º	20-25°C	9°C	1000°C	0:10
2º	1000°C	3,5- 3°C	1500°C	2:00
3º	1500°C	8°C	200°C	0:00

